

GUIDA

# COME ESEGUIRE IL PRELIEVO DI URINE E FECI

**PRELIEVO URINE**

[Vai alle istruzioni](#)

**PRELIEVO FECI**

[Vai alle istruzioni](#)

# COSA È INCLUSO NEL KIT

## PER IL PRELIEVO

1



**VASETTO  
URINE**

2



**PROVETTA  
TAPPO BIANCO  
(URINE)**

3



**PROVETTA  
TAPPO VERDE  
(FECE)**

## PER LA SPEDIZIONE

B



**BIOHAZARD  
BAG GRANDE**

C



**SCATOLA  
BIANCA**

D



**BUSTA DI  
SPEDIZIONE**

# **COME ESEGUIRE IL PRELIEVO DELLE URINE**

## STEP 1

# Prelievo urine

Lava le mani sotto acqua corrente.

**Raccogli il primo getto d'urina nel vasetto tondo (1) senza toccare l'interno del contenitore. Chiudi bene il contenitore.**



## STEP 2

# Riempimento provetta

Inserisci la provetta da 9ml con tappo bianco (2) nel foro presente sul coperchio del contenitore delle urine, esercitando una **leggera pressione verso il basso**. L'urina raccolta andrà automaticamente a riempire la provetta.

**Stacca la provetta dal contenitore.**

### **Attenzione**

Il mancato riempimento è da ricondursi alla raccolta di un **volume d'urina scarso** o alla **non idonea chiusura del contenitore giallo**.



## STEP 3

# Preparare la spedizione

1. Inserisci la provetta nella biohazard bag (B), insieme alla provetta contenente il sangue
2. Metti la biohazard all'interno della scatola bianca (C)
3. Inserisci la scatola nella busta per la spedizione (D)
4. Getta le componenti usate del kit per il test nei rifiuti domestici

### **Attenzione**

La provetta delle urine deve essere inserita all'interno della biohazard bag con la banda blu (B), insieme alla provetta del sangue e delle feci.


**COME ESEGUIRE  
IL PRELIEVO  
DELLE FECI**

## STEP 1

# Provetta feci

**Lava le mani sotto acqua corrente.**

La provetta (3) per l'analisi del sangue occulto nelle feci (FOBT) viene consegnata con il campionatore immerso in una soluzione che ne garantisce la stabilità. **È importante quindi non svuotare la provetta dal suo liquido.**

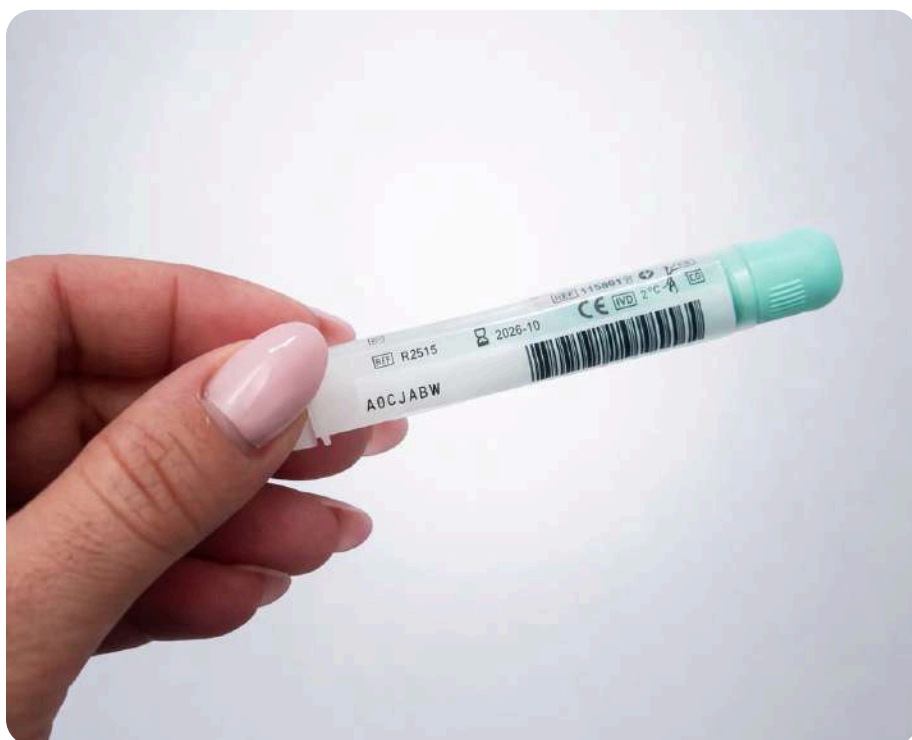

## STEP 2

# Raccolta del campione

**Svita il tappo verde e preleva un campione di feci. Richiudi la provetta dopo il prelievo.**

Il tubo ha una **chiusura ermetica** e garantisce la stabilità del campione fino a 7 giorni.

### **Attenzione**

Assolutamente **non svitare il tappo bianco.**



## STEP 3

# Preparare la spedizione

1. Inserisci la provetta nella biohazard bag grande (B), insieme alla provetta contenente il sangue
2. Metti la biohazard all'interno della scatola bianca (C)
3. Inserisci la scatola nella busta per la spedizione (D)
4. Getta le componenti usate del kit per il test nei rifiuti domestici

### **Attenzione**

La provetta delle feci deve essere inserita all'interno della biohazard bag con la banda blu (B), insieme alla provetta del sangue e delle urine.